

ガッチリTM

過酷な作業、水仕事でも

◀ **ガシガシ** ▶ 作業できる

**ハードな
作業に!**

Mサイズ 14枚入

Lサイズ 10枚入



サイズ / 70mm×21mm (パッド部 22mm×13mm)

サイズ / 77mm×30mm (パッド部 32mm×18mm)

ハードな作業・水仕事に強い!!

絆創膏を貼るとゴワゴワして
仕事がしにくい...

諦めていたシーンにガッチリバン™は最適!!

ハードな作業に ガッチリ!



丈夫な布素材で
破れにくい!



ガッチリ付くのに
しなやかフィットで
手作業ラクラク!

水仕事に ガッチリ!




強粘着だから
水仕事に負けない!



水に濡れても
乾きやすいから快適!

肌思いで ガッチリ!

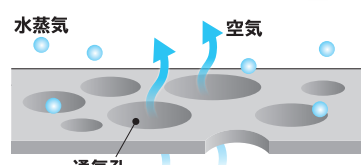

肌にやさしいから
かぶれにくい!



汗や水蒸気を
逃がすから
ムレにくく快適!

こんな方におすすめ

一生懸命が日常になっている人達を応援



美容師
理容師



水産業



農作業



土木
建築



介護
福祉



調理



家事

〈規格〉

品名	品番	内容	包装	入目	希望 小売価格 (消費税別)	JANコード	JANコード	包装サイズ (mm) 幅 × 奥行 × 高さ (高さ+フック)	質量
							中箱 G-TINコード		
							外箱 G-TINコード		
ガッチリバン™	GB14M	M サイズ 14 枚	個装	—	420 円	4 987167 098872	4987167098872	63×20×(98+20)	18g
			中箱	10コ			24987167098876	220×66×102	237g
			梱	200コ			14987167098879	531×280×232	5.2kg
	GB10L	L サイズ 10 枚	個装	—	420 円	4 987167 098889	4987167098889	63×25×(98+20)	20g
			中箱	10コ			24987167098883	270×66×102	245g
			梱	200コ			14987167098886	531×280×282	5.4kg

一般医療機器 救急絆創膏

〈使用法〉

患部を清潔にし、キズぐちにパッドをあて、テープ部を伸ばさずに貼る。その後、上から押さえて皮ふに密着させる。

〈使用上の注意〉

●パッドより大きなキズには使用しない。●キズを清潔に保つため、入浴後やパッドが汚れた場合は新しいものに貼り替える。●発疹・発赤、水疱、皮ふはく離、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談する。●はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがす。●水濡れ、高温、多湿、直射日光をさけ、小児の手の届かない所に保管する。●軟膏等を併用するとはがれやすくなる。●個包装紙に天然ゴムラテックスを使用。●使用後に粘着剤が皮ふに残った場合は、ハンドクリーム等でなじませると取りやすくなります。【再使用禁止】

このカタログの内容は、2023年5月現在のものです。

TM : trademark