

医療品質なのに、 この価格。



食品衛生法適合品

丈夫で 破れにくいのに、高いグリップ力

特長1

強度 & 作業性



指先の滑り止め加工で
高いグリップ力を発揮

特長2

高い品質基準



ASTM ※ 米国試験材料協会の
厳しい試験の合格品

特長3

ピンホール発生率が
極めて低い



【タケトラの医療機器グレード】
ピンホール：1.5%以下
【JIS規格】ピンホール：2.5%以下

- 伸縮性、耐水性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材
- 指先の滑り止め加工により、高いグリップ力を発揮
- テープが付きにくいいため、作業性が向上

仕様

- ・ 指先の厚み：約 0.08～0.12mm
- ・ 掌の厚み：約 0.06～0.10mm

ラテックスフリー

食品衛生法適合品

パウダーフリー

一般医療機器(クラスI)

タケトラ® ニトリル手袋 200枚入

発注コード	商品名	竹虎品番	価格
389-2890	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ホワイト S S	075811	大幅プライス ダウン!! 応援価格 3,261円 (税抜) 2,024円 医療品質レベルでありながら、 コストパフォーマンスを追究。
389-2875	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ホワイト S	075812	
389-2882	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ホワイト M	075813	
389-2894	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ホワイト L	075814	
389-2891	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ブルー S S	075851	
389-2881	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ブルー S	075852	
389-2878	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ブルー M	075853	
389-2892	竹虎 タケトラ ニトリル手袋 ブルー L	075854	

物性データ

伸縮性、耐水性、薬剤耐性に優れています

	テスト	目的	規格	結果
物理的特性	引張り強度 ASTM D6319	グローブを引っ張り、破断時の強度を評価します。	4.0 AQL [老化前] ≥ 14.0MPa [老化後] ≥ 14.0MPa	4.0 AQL [老化前] ≥ 14.0MPa : 合格 [老化後] ≥ 14.0MPa : 合格
	最大伸長度 ASTM D6319	グローブを引っ張り、裂けるまでの最大の伸びを評価します。	4.0 AQL [老化前] ≥ 500% [老化後] ≥ 400%	4.0 AQL [老化前] ≥ 500% : 合格 [老化後] ≥ 400% : 合格
	厚み ASTM 3767	測定器を用い、指定された圧力を加えて指先、掌部分の厚みを測定します。	4.0 AQL [指先] ≥ 0.06mm [掌] ≥ 0.05mm	4.0 AQL [指先] ≥ 0.06mm : 合格 [掌] ≥ 0.05mm : 合格
	長さ ASTM 3767	測定器を用い、指先から袖口までの長さを測定します。	4.0 AQL ≥ 240mm	4.0 AQL ≥ 240mm : 合格
	パウダー残留量 ASTM 6124	グローブ表面に残留するパウダー量を測定します。	<2mg	<2mg : 合格
	水漏れ ASTM D5151	グローブのピンホール(ごく小さい穴)の有無を調べるため、水を入れて漏れがないか評価します。	2.5AQL	1.5AQL : 合格
感刺 作激 性と	一次皮膚刺激 ISO-10993-10	グローブが接触する皮膚への刺激について評価します。	0~0.4 : 無刺激性	0 : 無刺激性
	感作性試験 ISO-10993-10	グローブからの抽出物による皮膚感作について評価します。	0 : 目に見える変化なし	0 : 目に見える変化なし
バ リ ア 性	耐薬品性 EN16523-1 37% Formaldehyde	ホルムアルデヒドに対する防護性能を確認します。		480 分まで浸透せず (レベル 6)
	耐薬品性 EN16523-1 40% Sodium hydroxide	水酸化ナトリウムに対する防護性能を確認します。		480 分まで浸透せず (レベル 6)
	血液由来病原体透過性 ASTM F1671	グローブに、血液由来病原体が、透過しないかを評価します。		合格
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Cyclophosphamide(Cytosan), 20mg/ml	抗がん剤 (一般名:シクロホスファミド (エンドキサン)) に対する防護性能を確認します。		240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Dacarbazine(DTIC), 10.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:ダカルバジン (ダカルバジン)) に対する防護性能を確認します。		240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Fluorouracil, 50.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:フルオロウラシル (5-FU)) に対する防護性能を確認します。		240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Methotrexate, 25mg/ml	抗がん剤 (一般名:メトトレキサート (メソトレキセート、リウマトレックスなど)) に対する防護性能を確認します。		240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Vincristine Sulfate, 1.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:硫酸ビンクリスチン (オンコビン)) に対する防護性能を確認します。		240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Paclitaxel(Taxol), 6.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:パクリタキセル (タキソール)) に対する防護性能を確認します。	—————	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Etoposide(Toposar), 20.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:エトポシド (ペプシド、ラステットなど)) に対する防護性能を確認します。	—————	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Doxorubicin Hydrochloride.2.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:ドキシルビン塩酸塩、(ドキシル、アドリアシンなど)) に対する防護性能を確認します。	—————	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Mitomycin C, 0.5mg/ml	抗がん剤 (一般名:マイトマイシン C (マイトマイシン)) に対する防護性能を確認します。	—————	240 分まで浸透せず
	抗がん剤耐性 ASTM D6978-05 Cisplatin, 1.0mg/ml	抗がん剤 (一般名:シスプラチン (アイーコール、プリプラチン、ランダなど)) に対する防護性能を確認します。	—————	240 分まで浸透せず

広い取り出し口で、
一枚ずつ取り出しやすい



規格ごとに色分けされた箱で
使いたいサイズを一目でセレクト



パッケージイメージ

ブルー

ホワイト

今お使いの手袋と、ぜひ比べてください。
一度使うと、その違いが分かります。